



La Lipoaspirazione Superficiale Assistita con Laser Ceralas Biolitec

LASER LIPOLYSIS

laevita

LASER BODY TREATMENT

biolitec Italia
Viale Monza, 133
20125 - Milano
Tel. +39 02 28 172 400
Fax +39 02 454 85 370
eMail: info@biolitec.it

biolitec AG
Winzerlaer Straße 2a
D-07745 Jena, Germany
Phone +49 (0) 36 41/5 08-5 50
Fax +49 (0) 36 41/5 08-5 99
eMail info@biolitec.de

LBT

Laevita Body Treatment

La tecnica chirurgica

La tecnica con Laser a Diodi Ceralas E, consiste nel trattamento dello strato profondo e superficiale del tessuto sottocutaneo, per conseguire sia la retrazione della cute, che la diminuzione del contenuto lipidico, in relazione allo spessore e alla compromissione del tessuto stesso.

E' necessaria l'adesione a un protocollo sicuro e validato sperimentalmente per conseguire buoni risultati; nel protocollo LBT diventa essenziale attenersi ad una precisa sequenza operativa, soprattutto per grandi volumi di lipoemulsione.

I vantaggi del protocollo LBT

- **non distrugge il tessuto di sostegno ed è selettivo sugli adipociti**
- **produce una retrazione fibroelastica che può diminuire fino al 50% la flaccidità cutanea**
- **riduce le complicanze tipiche dell'atto chirurgico, come i sanguinamenti, gli ematomi, le irregolarità, le depressioni, l'epiteliolisi e le necrosi cutanee**
- **anche nelle lipoaspirazioni di grandi volumi, consente un recupero veloce, drenaggio circoscritto alle 48 ore e tempi di elastocompressione ridotti a 7 giorni complessivi;**
- **è target dipendente, poichè il laser può operare in modalità continua e pulsata, con differenti potenze in relazione alle differenti zone da trattare, ai volumi di emulsione, agli elementi essenziali per il tessuto stesso, quali i piccoli e grandi vasi.**



Il protocollo LBT

Laevita Body Treatment contempla i quadri patologici coesistenti nell'adiposità distrettuale onde non precludere definitivamente il ripristino delle funzioni metaboliche tissutali.

Di conseguenza, il protocollo Laevita, seppur asservito alla precisione strumentale, viene arricchito di più strumenti terapeutici volti a garantire una soluzione clinica globale e stabile nel tempo.

Le soluzioni adottate sono in grado di stimolare le funzioni tissutali e, in tal modo, ripristinare l'eutrofia cutanea nel breve termine e nel post intervento.

La lampada a infrarossi Biolitec, la crema Laevita Body Contouring e LinfoDith Plus rappresentano nel loro insieme un'associazione terapeutica completa ed essenziale per stimolare:

- **l'angiogenesi e la vasodilatazione profonda**
- **le funzioni della matrice extracellulare**
- **gli elementi cellulari delle zone cutanee trattate.**
- **le funzioni ematiche e linfatiche**
- **il metabolismo cellulare**

Laser Ceralas Laevita, Lampada Biolitec, Laevita Body Contouring Cream, LinfoDith Plus e Dieta Funzionale per un approccio completo che va oltre alla semplice lipolisi!



Laevita Body Treatment un approccio innovativo multidimensionale