

STATO NUTRIZIONALE



SUITE NUTRIZIONALE 15.00




Valutazione Stato Nutrizionale

Aggiunta nei risultati la valutazione dello **STATO NUTRIZIONALE**, con rappresentazione grafica. Il grafico si compone di due valutazioni:

- 1) **ESPANSIONE DEL COMPARTIMENTO INTRACELLULARE O EXTRACELLULARE**
- 2) **PREVALENZA DELLA COMPONENTE ADIPOSITA O MUSCOLARE**

GRAFICO

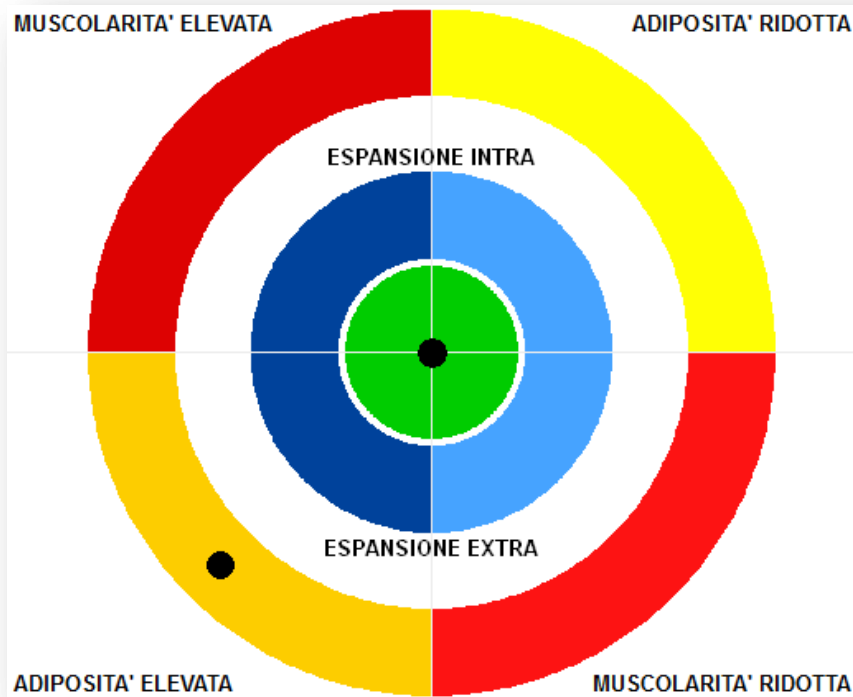

VALUTAZIONE

<u>Valutazione</u>			
Idratazione:	Nella norma		
Adiposità:	Elevata	FAT:	33,60 %
Stato nutrizionale:	Fuori norma	Z250/Z5:	0,83

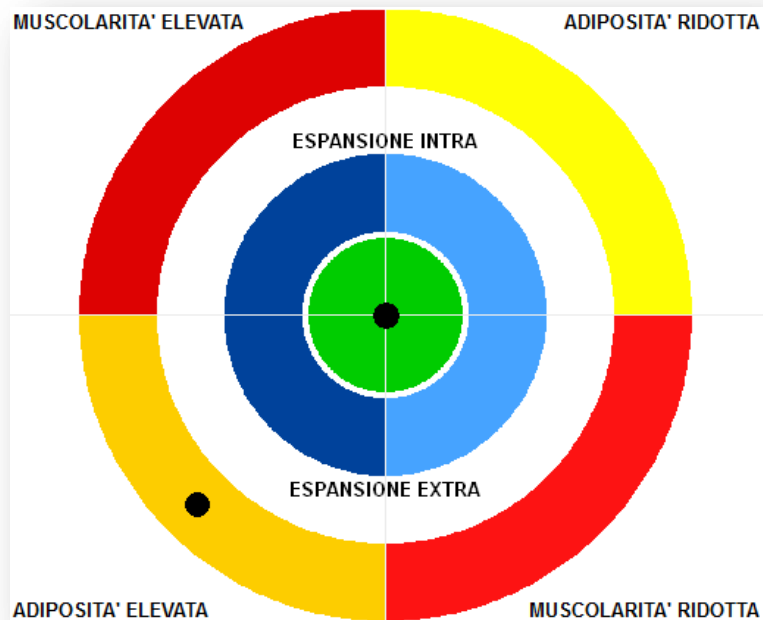


Grafico Stato Nutrizionale

ESPANSIONE DEL COMPARTIMENTO INTRACELLULARE O EXTRACELLULARE

Parte centrale del grafico (settore blu). Tiene conto dei seguenti parametri:

- Rapporto ECW/ICW (acqua extracellulare / acqua intracellulare)
- Angolo di fase a 50 kHz
- Rapporto ECM/BCM (massa extra cellulare / massa cellulare metabolicamente attiva)



Se i compartimenti intracellulare ed extracellulare sono in equilibrio l'indicatore si posizionerà sulla fascia verde centrale.

Se i due compartimenti non sono in equilibrio l'indicatore si posizionerà su uno dei settori azzurri.



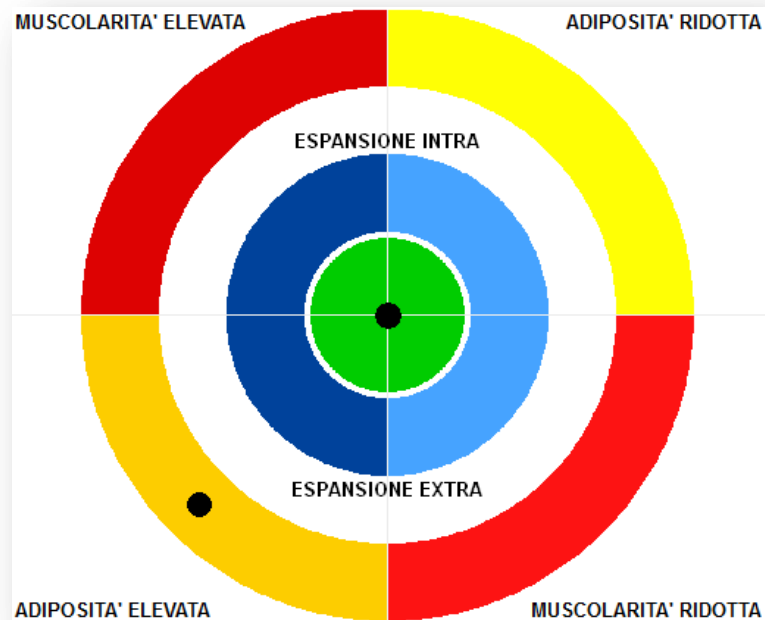


Grafico Stato Nutrizionale

PREVALENZA DELLA COMPONENTE ADIPOSA O MUSCOLARE

Parte esterna del grafico (settore giallo e rosso). Tiene conto dei seguenti parametri:

- Adiposità (FAT%)
- Muscolarità (Indice SM – Skeletal Muscle)



Se adiposità e muscolarità sono nella norma l'indicatore si posizionerà sulla fascia verde centrale.

Se i due compartimenti sono fuori norma l'indicatore si posizionerà su uno dei settori rossi o gialli.

