

SUITE NUTRIZIONALE 17.00

Le novità



TERAPIA ALIMENTARE



IMPEDENZIOMETRIA



PLICOMETRIA

TERAPIA ALIMENTARE



BANCHE DATI

Ricette e ingredienti

- Ricette con pasta speciale (*di riso, farro, kamut, grano saraceno, teff, quinoa, amaranto*)
 - Ricette con cereali in chicco (*miglio, bulgur, quinoa, farro, orzo, avena*)
- Ingredienti del commercio (*mix di frutta secca/essiccata, barrette di frutta secca/essiccata, bowl di cereali, burger di cereali, creme e vellutate bio*)
 - Ricette vegetariane e vegane

L'inserimento di questa batteria di ricette e ingredienti è presente anche nella fisiologica per l'elaborazione di menù non strettamente vegetariani e/o vegani.

COMUNICAZIONE APP E DIETA

IMPEDENZIOMETRIA



VALUTAZIONE STATO NUTRIZIONALE

Grafico a torta

- Rappresentazione grafica rinnovata (sez. ECW)
 - Interpretazione Qualità Nutrizionale
 - Score Qualità Nutrizionale

Per una migliore e pronta decodificazione della qualità dello stato nutrizionale.

VALUTAZIONE QUALITÀ MUSCOLARE

Grafico a torta

- Nuovo parametro di screening (SPPB) (short physical performance battery)

Test: Balance Test - Gait speed test - Chair stand test

Per una migliore valutazione più completa e più comoda in ambito ambulatorio è stato sostituito il parametro ematochimico "albumina" con una breve batteria di test per la valutazione della funzionalità degli arti.

RISULTATI IMPEDENZIOMETRICI

Grafici a istogramma

- Nuova rappresentazione grafica ad istogrammi per ogni parametro

Per una immediata e facile comprensione del quadro clinico del soggetto.

SELEZIONE EQUAZIONI

Motore di selezione

- Nuovo motore di selezione delle equazioni. A partire dai dati di Z, angolo di fase e reattanza, il software seleziona in automatico l'equazione idonea allo stato clinico del soggetto.

Per una risposta più reale del quadro clinico i dati, derivati dalle equazioni, risultano corrispondenti ai valori diretti di Z, angolo di fase e reattanza.

COMUNICAZIONE APP E IMPEDENZIOMETRIA

PLICOMETRIA



VALUTAZIONE STATO NUTRIZIONALE

Grafico a torta

- Interpretazione Qualità Nutrizionale
 - Score Qualità Nutrizionale

Per una migliore e pronta decodificazione della qualità dello stato nutrizionale del soggetto.

VALUTAZIONE QUALITÀ MUSCOLARE

Grafico a torta

- Nuovo parametro di screening (SPPB) (short physical performance battery)

Test: Balance Test - Gait speed test - Chair stand test

Per una migliore valutazione più completa e più comoda in ambito ambulatorio è stato sostituito il parametro ematochimico "albumina" con una breve batteria di test per la valutazione della funzionalità degli arti.

COMUNICAZIONE APP E PLICOMETRIA

MAGGIORI INFORMAZIONI

www.dsmedica.info/suite-nutrizionale-17

OPPURE CONTATTACI



www.dsmedica.info



02 28005700



nutrizione@dsmedica.info



[@ds.medica](https://www.facebook.com/ds.medica)



[@dsmedica](https://www.instagram.com/dsmedica)